


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ĐAI BẢO VỆ KHUỖY TAY VANTELIN
VANTELIN SUPPORT ELBOW

HƯỚNG DẪN CHỌN CỖ THIẾT BỊ:

S: 7,5-9 in / 19-22 cm

M: 9-10 in / 22-25 cm

L: 10-11 in / 25-28 cm

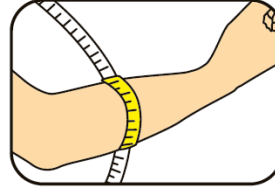

Đo xung quanh cánh tay như hình vẽ. Nếu có 2 cỡ phù hợp thì chọn cỡ lớn hơn.

ĐẶC TÍNH


	<p>Cấu trúc quần hình chữ X</p> <p>Cấu trúc quần hình chữ X ở mặt trong khuỷu tay làm hạn chế các cử động quá mức và làm giảm sự khó chịu khi nâng các vật nặng.</p>
	<p>Tấm lưới thông hơi</p> <p>Cấu trúc lưới dệt kim phía bên ngoài của khuỷu tay cho phép sản phẩm thích nghi tốt với cử động của khuỷu tay.</p>
	<p>Cấu trúc bám chặt</p> <p>Bờ trên và dưới liền mạch để ngăn sản phẩm bị trượt và ổn định cấu trúc quần hình chữ X.</p>

CHỈ ĐỊNH

Sử dụng hàng ngày khi bị đau hay khó chịu ở khớp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Luôn cánh tay vào sản phẩm sao cho phần đáy chữ “V” hướng xuống dưới.
2. Cố định phần lưới dệt kim hình chữ X ở phía bên trong của khuỷu tay sao cho phần chính giữa của chữ X khớp với phần gấp của khuỷu tay.
3. Vuốt lại đai để tránh bị chụm khi cong khuỷu tay.
 - Luôn đeo đai trực tiếp lên da.
 - Nếu đai không được đeo đúng vị trí, nó có thể không mang lại tác dụng như dự kiến.
 - * Hiệu quả thu được từ việc đeo đai hỗ trợ có thể khác nhau tùy thuộc vào người sử dụng.

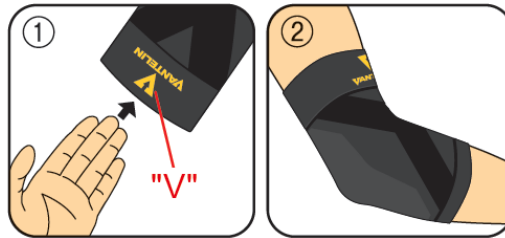

CẢNH BÁO

- Không sử dụng trong trường hợp: (1) có các bất thường bao gồm sưng, đau mạnh do bong gân, gãy xương, chấn thương dây chằng, v.v... (2) rối loạn mạch máu ngoại biên, (3) các trường hợp bất thường như bị thương, sưng tấy, nổi đỏ tại vị trí đeo đai, hoặc (4) viêm da mãn tính/dị ứng với sợi hóa học hoặc cao su. Nếu bạn có biểu hiện phát ban / mẩn đỏ, ngứa, nổi mụn, xung huyết, đau bất thường, hoặc sưng tấy, dừng sử dụng sản phẩm ngay lập tức và tham vấn ý kiến chuyên môn của nhân viên y tế..
- Chỉ sử dụng theo hướng dẫn.
- Sử dụng đúng kích cỡ.
- Không đeo đai khi ngủ.

HƯỚNG DẪN VỆ SINH THIẾT BỊ (SỬ DỤNG TÚI GIẶT)

1. Giặt riêng ở nhiệt độ dưới 30°C.
2. Không tẩy trắng.
3. Không sấy khô.
4. Treo và làm khô bằng không khí. Tránh ánh nắng trực tiếp.
5. Ủ ở nhiệt độ thấp. Không ủi hơi nước.
6. Không được giặt khô.

LƯU Ý VỀ BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ SẢN PHẨM

1. Không để sản phẩm gần nguồn lửa và nguồn nhiệt.
2. Để xa tầm tay trẻ em.
3. Sản phẩm có thể bị rách nếu đeo không đúng cách hay tác động lực mạnh lên các phần của sản phẩm.

ĐÓNG GÓI

Hộp 1 cái.

CHỦ SỞ HỮU SẢN PHẨM

Kowa Company, Ltd. 4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, NHẬT BẢN.

NHÀ SẢN XUẤT

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, YAMAGUCHI, KOUHOKU-MACHI, KISHIMA-GUN, SAGA-KEN 849-0501 NHẬT BẢN

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ BẢO HÀNH

Tên cơ sở: Công ty TNHH DKSH Việt Nam

Địa chỉ: Văn phòng đại diện Công ty TNHH DKSH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa nhà Viettel Complex, 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3812 5848